

-Fitostimoline[®] proctogel

Con Rigenase[®] (estratto di grano) e Poliesanide

Uso topico.

Fitostimoline[®] proctogel è un dispositivo medico costituito da un gel contenuto in un tubo di alluminio e da un applicatore multiuso **CE** da usarsi per il trattamento delle emorroidi.

INGREDIENTI:

Rigenase[®] (estratto di grano), Glicerina, Idrossietilcellulosa, Fenossietanolo, Polietilenglicole 400, Mucosave[®] CG (*Opuntia ficus indica extract, Olea europaea leaves extract, maltodextrin*), Acqua depurata.

INDICAZIONI:

Fitostimoline[®] proctogel, grazie alla sua particolare formulazione (contenente Rigenase[®]), forma una barriera protettiva sulla mucosa rettale, donando sollievo immediato da sintomi quali prurito e bruciore, lasciando una piacevole sensazione di freschezza, creando condizioni favorevoli per una rapida e corretta azione riepitelizzante e tenendo sotto controllo il microambiente in caso di ragadi, sintomatologia emorroidaria, fistole. Il pH acido contribuisce a ridurre il rischio di contaminazione di funghi e batteri. Rigenase[®] è uno specifico estratto di grano germinato.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Si consiglia di condurre un accurato lavaggio delle aree interessate prima dell'applicazione

Modalità di applicazione:

Al primo utilizzo, svitare il tappo e aprire il tubo mediante perforazione con il cuneo sul retro del tappo.

Avvitare il dispositivo di erogazione endorettale presente nella confezione, e rimuoverne il tappino di chiusura.

Premere sul tubo di alluminio in modo da applicare quanto occorre di gel sulla parte interessata.

Procedere analogamente per i successivi utilizzi.

Utilizzare il prodotto dopo l'evacuazione.

Dopo l'uso lavare accuratamente l'erogatore e richiudere il tubo avvitando l'apposito tappo di chiusura.

Frequenza del trattamento:

Il trattamento comporta per lo meno tre applicazioni di gel al giorno.

EFFETTI INDESIDERATI:

Non sono stati segnalati effetti indesiderati. È importante comunque segnalare al medico o al farmacista l'eventuale insorgenza di effetti indesiderati

CONTROINDICAZIONI:

Ipersensibilità accertata o presunta verso i componenti.

OPPORTUNE PRECAUZIONI DI IMPIEGO:

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Ove ciò si verifici, occorre interrompere il trattamento ed istituire, se necessario, una terapia idonea.

INTERAZIONI:

Non sono note interazioni o incompatibilità con altri prodotti.

AVVERTENZE:

Prima dell'uso, leggere attentamente il foglio illustrativo.

Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi.

Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione; la data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

Non utilizzare il prodotto in caso di confezione danneggiata.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:

Conservare il prodotto a temperatura non superiore ai 30°C. Non congelare.

CONFEZIONI:

Tubo da 35 g con applicatore multiuso **CE**

Tubo da 10 g con applicatore multiuso **CE** (Campione gratuito)

Tubo da 5 g con applicatore multiuso **CE** (Campione gratuito)

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.



FABBRICANTE

Farmaceutici Damor, S.p.A.

Via E. Scaglione, 27 - Napoli

Fax: +39 081 7405172 - e-mail: damor@farmadamor.it

® nome depositato

CE 0425 DISPOSITIVO MEDICO

Data di revisione del testo del foglietto illustrativo: Marzo 2020

Descrizione dei simboli usati sul confezionamento interno ed esterno



Leggere attentamente il foglietto illustrativo



Leggere attentamente le avvertenze



Limiti della temperatura di conservazione

ALU

Tubo in alluminio

LOT



Numero di lotto e data di scadenza



Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso



Fabbricante



Marchatura di conformità alle direttive della Comunità Europea