

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Fitostimoline® SEPTAGEL

con Rigenase® e Poliesanide

Uso vaginale

Fitostimoline® Septagel è un dispositivo medico costituito da un gel per uso ginecologico contenuto in un tubo di alluminio con applicatori monouso.

INGREDIENTI:

Rigenase®, Glicerina, Idrossietilcellulosa, Fenossietanolo, Polietilenglicole 400, Poliesanide, Acqua depurata.

PROPRIETA':

Fitostimoline® Septagel forma un film protettivo sulla mucosa vaginale contribuendo a ricreare condizioni favorevoli al ripristino del microambiente vaginale durante la manifestazione di affezioni flogistiche e distrofiche.

La presenza di poliesanide riduce il rischio di contaminazione batterica.

Rigenase® è uno specifico estratto di grano.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Modalità di applicazione:

- 1) Perforare la prima volta il tubo di gel, utilizzando il perforatore contenuto nella parte superiore del tappo di chiusura.
- 2) Avvitare un applicatore vaginale.
- 3) Premere il tubo di gel fino al riempimento totale dell'applicatore.
- 4) Svitare l'applicatore dal tubo, introdurlo in vagina e premere lo stantuffo fino al termine della sua corsa.
- 5) Ogni applicatore va utilizzato una sola volta.

Frequenza del trattamento:

1 applicazione ogni 3 giorni.

EFFETTI INDESIDERATI:

Non sono stati segnalati effetti indesiderati. È importante comunque segnalare al medico o al farmacista l'eventuale insorgenza di effetti indesiderati.

CONTROINDICAZIONI:

Ipersensibilità accertata o presunta verso i componenti.

OPPORTUNE PRECAUZIONI DI IMPIEGO:

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Ove ciò si verifici, occorre interrompere il trattamento ed istituire, se necessario, una terapia idonea.

INTERAZIONI:

Non sono note interazioni o incompatibilità con altri prodotti.

AVVERTENZE:

Prima dell'uso, leggere attentamente il foglio illustrativo.

Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi.

Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione; la data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:


Conservare il prodotto ad una temperatura non superiore ai 30 °C. Non congelare.

CONFEZIONI:

Tubo da 30 g con 6 applicatori monouso 

Tubo da 6 g con 1 applicatore monouso **CE** (campione gratuito)

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.

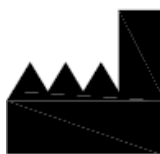

FABBRICANTE

Farmaceutici Damor S.p.A.
Via E. Scaglione, 27 - Napoli
Fax: +39 081 7405172
e-mail: damor@farmadamor.it

® nome depositato



Data di revisione del testo del foglietto illustrativo: Agosto 2021


Descrizione dei simboli usati sul confezionamento interno ed esterno



Leggere attentamente il foglietto illustrativo.



Leggere attentamente le avvertenze.

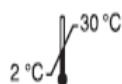


Limiti della temperatura di conservazione.



Numero di lotto e data di scadenza.



Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

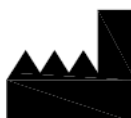

Fabbricante.



Marcatura di conformità alle direttive della Comunità Europea.



CV59780