

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Oligactive® fiale con Rigenase®

Uso sottocutaneo

Oligactive® fiale è un dispositivo medico costituito da una soluzione sterile per uso sottocutaneo. L'iniezione della soluzione è da effettuarsi esclusivamente su fronte, volto, collo ed aree limitrofe.

INGREDIENTI:

Rigenase®, Cloruro di sodio.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Oligactive® fiale, grazie alla sua particolare formulazione (contenente Rigenase®) esplica attività idratante ed antiossidante nell'area in cui è iniettato, pertanto è in grado di rimuovere inestetismi in soggetti con segni di invecchiamento cutaneo.

Rigenase® è uno specifico estratto di grano germinato.

ISTRUZIONI PER L'USO:

L'applicazione del prodotto è riservata esclusivamente ad operatori sanitari professionali muniti di adeguata qualificazione.

Aprire la fiala, prelevare il volume di soluzione necessario con una siringa sterile (ago 29-30G) ed effettuare infiltrazioni intradermiche multiple nelle zone da trattare (preventivamente disinfettate), ad una distanza non inferiore ad 1 cm l'una dall'altra. Il volume iniettato non deve essere superiore ai 0.5 mL per punto di infiltrazione ed il volume totale iniettato in ogni singola sessione non deve superare i 10 mL. Eliminare eventuali residui di soluzione rimasti nella fiala.

Applicare il prodotto ogni sette giorni salvo diversa indicazione medica.

EFFETTI INDESIDERATI:

Sensazione di bruciore/dolore all'atto dell'iniezione del dispositivo, limitato alla durata della procedura infiltrativa e generalmente di entità lieve. Questo è un evento comune in caso di infiltrazioni intradermiche, connesso con il tipo di prodotto iniettato, il volume somministrato e la procedura in quanto tale.

E' importante comunque segnalare al medico o al farmacista l'eventuale insorgenza di effetti indesiderati.

CONTROINDICAZIONI:

Ipersensibilità accertata o presunta verso i componenti.

OPPORTUNE PRECAUZIONI DI IMPIEGO:

Le soluzioni che non si presentano perfettamente limpide non devono essere usate.

Il contenuto della fiala deve essere usato una sola volta.

Dopo l'uso gettare ogni eventuale residuo di soluzione.

INTERAZIONI:

Non sono note interazioni o incompatibilità con altri prodotti.

AVVERTENZE:

Prima dell'uso, leggere attentamente il foglio illustrativo.

Non utilizzare in gravidanza e in allattamento.

Nelle 24 ore successive ad ogni seduta infiltrativa è consentito utilizzare:

- creme/gel incolori e ad attività esclusivamente idratante
- ombretti ed eye-liner
- mascara
- rossetto per labbra

Non utilizzare Oligactive® se si sta eseguendo una terapia locale con farmaci e/o dispositivi nella zona interessata all'iniezione.

Non utilizzare in caso di cute lesionata.

Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi.

Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione; la data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto in caso di confezione danneggiata.

MODALITA' DI CONSERVAZIONE:

Conservare il prodotto a temperatura non superiore ai 30°C. Non congelare.

CONFEZIONI:

Contenitore con 1 Fiala da 5ml (Campione gratuito)


Contenitore con 1 Fiala da 5ml

Contenitore con 3 Fiale da 5ml

Contenitore con 5 Fiale da 5ml

Contenitore con 6 Fiale da 5ml

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.

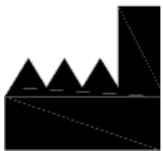

FABBRICANTE

Farmaceutici Damor S.p.A.
Via E. Scaglione, 27 - Napoli
Fax: +39 081 7405172
e-mail: damor@farmadamor.it

® nome depositato



Data di revisione del testo del foglietto illustrativo: Marzo 2020


Descrizione dei simboli usati sul confezionamento interno ed esterno



Leggere attentamente il foglietto illustrativo



Leggere attentamente le avvertenze

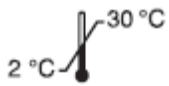

Limiti della temperatura di conservazione



Numero di lotto e data di scadenza



Non riutilizzare



Prodotto sterile



Prodotto fragile, maneggiare con cura



Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.



Fabbricante