
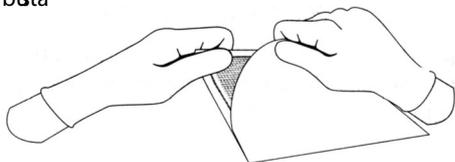
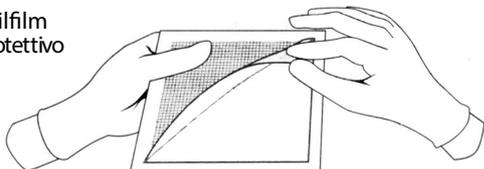



## 1 aprire la busta

2 rimuovere il film  
plastico protettivo

## 3 prelevare la garza

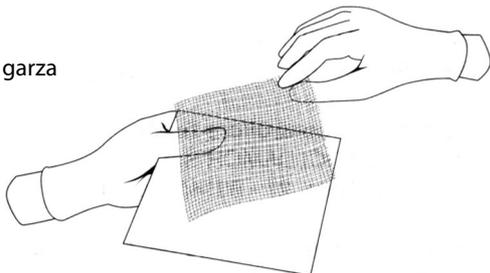

## 4 applicare la garza

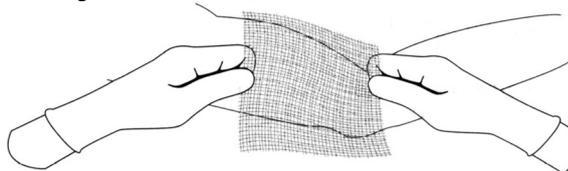**INTERAZIONI:**

Non sono note interazioni o incompatibilità con altri prodotti.

**AVVERTENZE:**

Prima dell'uso, leggere attentamente il foglio illustrativo.

Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi.

Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione; la data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

Non utilizzare il prodotto in caso di confezione danneggiata.

Non riutilizzare la garza: il riutilizzo può generare infezioni.

**MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:**

Non conservare al di sopra di 30°C. Non congelare.

**CONFEZIONI:**

Confezione da 10 garze

Confezione da 7 garze

Confezione da 5 garze

Confezione da 2 garze

Confezione da 1 garza

**NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO**

Farmaceutici Damor S.p.A.

Via E. Scaglione, 27 - Napoli

Fax: +39 081 7405172 - e-mail: [damor@farmadamor.it](mailto:damor@farmadamor.it)

® nome depositato

CE 0425

Data di revisione del testo del foglietto illustrativo: Dicembre 2021

**-Fitostimoline® PLUS**

Garze  
ADVANCE

con RIGENASE® e POLIESANIDE

Fitostimoline® PLUS Garze ADVANCE è un dispositivo medico per uso dermatologico costituito da garze monodose, impregnate con crema idrodispersibile.

**INGREDIENTI:**

Rigenase®, Poliesanide, Polietilenglicole 400, Polietilenglicole 600, Polietilenglicole 1500, Polietilenglicole 4000, Glicerina, Fenossietanolo, Acqua depurata.

**PROPRIETÀ:**

Fitostimoline® PLUS Garze ADVANCE forma una barriera protettiva contro l'ambiente esterno creando condizioni favorevoli per una rapida e corretta azione riepitelizzante sulla cute e contribuisce a tenerne sotto controllo il microambiente; pertanto il prodotto è indicato per il trattamento di ulcere, piaghe, ferite, ustioni di primo e secondo grado, scottature, abrasioni.

Rigenase® è uno specifico estratto di grano germinato. La presenza di poliesanide riduce il rischio di contaminazione batterica.

**ISTRUZIONI PER L'USO:****Modalità di applicazione:**

Prelevare la garza ed applicarla direttamente sulla parte preventivamente detersa e disinfettata.

Ricoprire con garza sterile e/o con cotone idrofilo (quando trattasi di piaghe molto secernenti).

Nelle successive medicazioni, salvo specifiche controindicazioni, si potrà procedere ad un preventivo lavaggio della parte con acqua sterile, in quanto la crema è completamente idrodispersibile e non lascia residui.

Ripetere l'applicazione ogni 48 ore salvo diversa indicazione del medico.

Uso cutaneo.

**EFFETTI INDESIDERATI:**

Non sono stati segnalati effetti indesiderati. È importante comunque segnalare al medico o al farmacista l'eventuale insorgenza di effetti indesiderati.

**CONTROINDICAZIONI:**

Ipersensibilità accertata o presunta verso i componenti.

**OPPORTUNE PRECAUZIONI DI IMPIEGO:**

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Ove ciò si verifici, occorre interrompere il trattamento ed istituire, se necessario, una terapia idonea.

Descrizione dei simboli usati sul confezionamento interno ed esterno

Leggere attentamente il foglietto illustrativo.



Leggere attentamente le avvertenze.



Limiti della temperatura di conservazione.



Sterilizzato mediante radiazioni.



Non riutilizzare le garze.



Numero di lotto e data di scadenza.



Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.



Fabbricante.



Marchatura di conformità alle direttive della Comunità Europea.